



AXIS KNEE BRACE ユーザーマニュアル

このたびは、evs AXIS ニーブレースをお買い求め頂きまして、まことにありがとうございます。ご使用になる前に、装着方法をよくお読みになって頂き、正しくご使用頂きますよう、お願い致します。


⚠ 注意

evs ニーブレースは、あらゆるスポーツにおいて、膝部にかかる予期せぬ方向からの力を軽減する事を目的としています。決して予期せぬ力が膝にかかる事によって生じる怪我から膝を守るものではありません。ご使用にあたっては装着方法をよくお読みになり、正しく装着してご使用下さい。

AXIS HINGE SYSTEM

HINGE STOP ADJUSTMENT エクステンションストップ調整方法

エクステンションストップにより、膝の伸展角度(前方向の伸び)を5段階に調整する事が可能です。

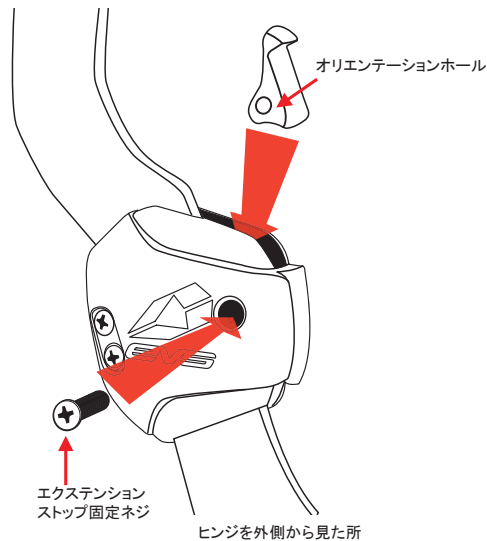

1:

ヒンジを 90°に曲げ、付属のレンチでエクステンションストップ固定ネジを外します。

2:

出荷時に装着されている 0°のエクステンションストップをご希望の角度のエクステンションストップのパーツと交換します。※左右のエクステンションストップは必ず同じ角度の物を使用して下さい。パーツの穴と固定ネジが一致するようにセットしてください。

3:

ヒンジを、真っ直ぐに伸ばし、セットしたエクステンションストップが定位置にしっかりとおさまっているか、オリエンテーションホールにエクステンションストップスクリューが通るかを確認してください。確認後、固定ネジを再び締めて固定します。

※締めすぎにご注意ください。固定ネジを締めた後は、ヒンジの開閉を繰り返して可動範囲の確認と、不具合が無いかを確認してください。

※走行後、ネジが緩む可能性がある為、各部点検、ネジの締め直しを行ってください。

⚠ 注意


過伸展角度の調整は膝の状態により選んで下さい。膝に合わない角度調整を行うと、膝の故障に繋がる場合がございます。

EXTENSION STOP TREE エクステンションストップ

表面の数字は可動範囲(角度)を表しています。

必要なパーツを切り離してご使用ください。

※可動範囲 0°~ 30°

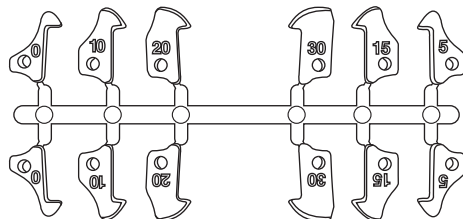


APPLICATION


ATTACHMENT STEPS 装着方法

ニーブレースの下に、アンダーパンツやブーツソックスを着用する事で、理想的な装着ができます。※アウターウェア(モトクロスウェア、デニム等)の上からの装着はお止め下さい。

- 1: ニーブレースが左右正しいかを確認してください。
- 2: ニーブレース外側のストラップベルクロ(B)を全て外し、ストラップをDリング(A)から抜きます。
- 3: 90°に曲げた膝にニーブレースを着けます。その際ヒンジは膝関節側面、カッパは膝の皿(膝蓋骨)の中心に来る様にします。

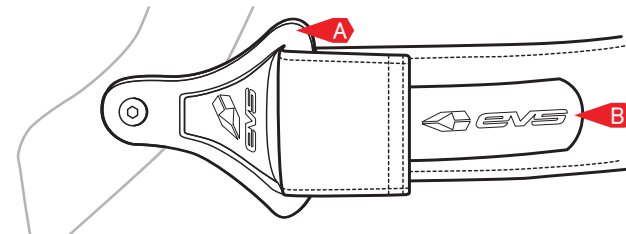

- 4: 4本のストラップを図①→②→③→④の順でセットしてください。

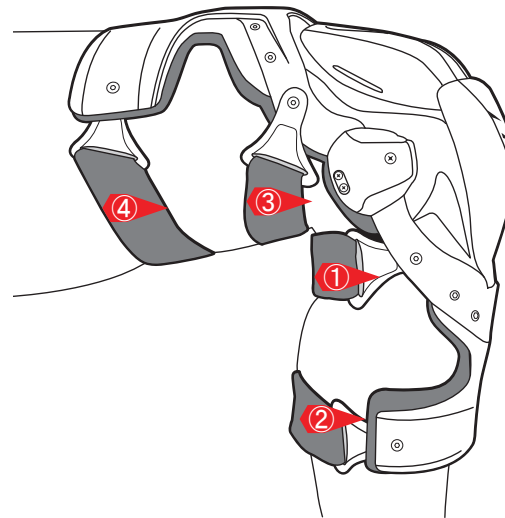

- ① 上から三番目の膝下ストラップ
(このストラップはふくらはぎの筋肉の上が正しい位置です)
- ② 上から四番目のストラップ
- ③ 上から二番目のストラップ
- ④ 一番上のストラップ

- 5: 最後に、全てのストラップが確実に装着されているかを確認してください。

※血液循環の為に、強く締めすぎない様、ご注意ください。

※ストラップを交差させないでください。


※運動後、筋肉が膨張する事が考えられますので、苦しい場合は再度ストラップの調整を行ってください。

※使用による不快感や痛みが生じた際には、ただちに使用を中止し、医師へ相談してください。

HINGE PAD ADJUSTMENT ヒンジパッド調整

AXIS ニーブレースは膝の幅を調整することが可能です。
図のように、ライナー内側に付属のパッドを追加することで、ニーブレースの幅を調整できます。

- 1：ヒンジ部のベルクロで接続されているインナーライナー(B)を外します。
 - 2：パッド(A)をヒンジ部のベルクロに装着し、その上からインナーライナーを取り付けます。
- 注意：パッド調整は、膝の外側から順に行ってください。

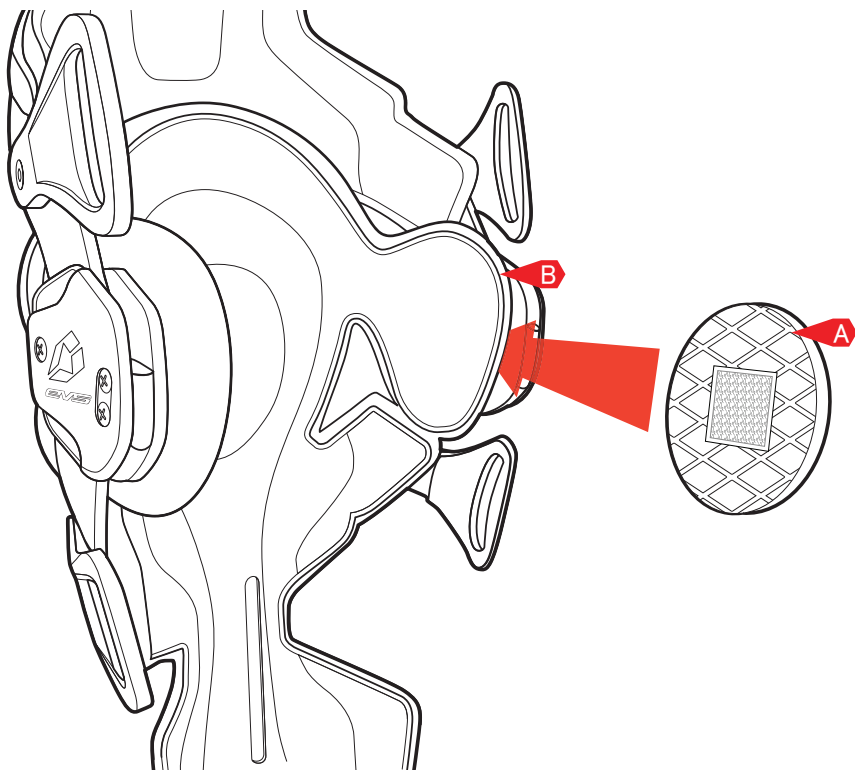


サイズ	S	M	L	XL
太もも 外周	38.1～ 43.2cm	45.7～ 50.8cm	50.1～ 58.4cm	59.7～ 66.1cm
ふくらはぎ 外周	25.4～ 30.5cm	30.5～ 35.6cm	36.9～ 40.6cm	41.9～ 45.7cm

※上記サイズの測定箇所は、いずれも膝関節中心から上下20cmです。

TENSION STRAP ATTACHMENT テンションストラップの取り付け方法

テンションストラップをニーブレース下部①にマジックテープを取り付け、
②～④の手順でテンションストラップを通し、ニーブレース上部⑤にマジックテープを取り付けます。
最後に⑥インナーライナーを本体にセットします。

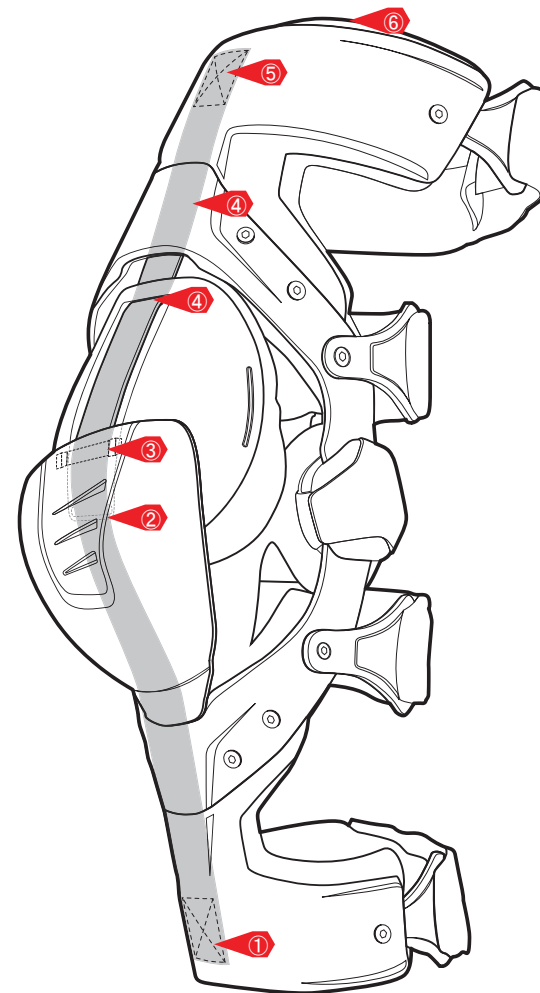

製品に関するお問い合わせは下記カスタマーサポートまで
(平日 9 時 30 分～ 17 時 30 分)



0120-22-3403

※携帯電話・PHS からご利用になれます

✉ taichi@rs-taichi.co.jp

発売元：株式会社アールエスタイチ 〒578-0901 大阪府東大阪市加納 6-4-9